


DIONavi. Full Arch

# Bite Jig 사용 방법

## Bite Jig 사용 효과

- Provisional Bridge 체결 시 **대합치와 교합관계에 맞추어 정확한 위치에 체결**할 수 있습니다.
- 임플란트 식립 오차에 의한 **Provisional Bridge 위치 오차**를 **사전에 확인**하고 **정확한 교합 위치로 보정**할 수 있습니다.
- 발치 즉시 상/하악 동시 진행하는 케이스에서 **Provisional Bridge의 정확한 교합관계 형성**에 유리합니다.

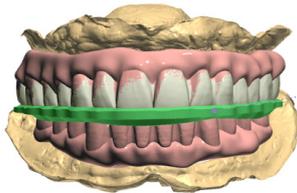


구강 스캔 데이터를 활용하여 정확하게 제작된 Bite Jig를 제공해 드립니다.



## Bite Jig 올바른 사용 방법




1 Provisional Bridge 구강 내 안착 및 확인

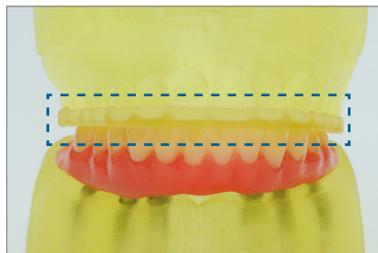


2 디오에서 제공한 Bite Jig를 이용하여 교합 상태 확인



3 Bite Jig를 활용하여 교합된 상태에서 양쪽 소구치 부위의 Hole을 통해 Resin 충전

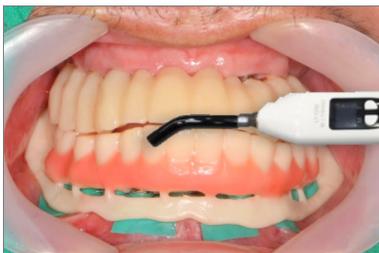

4 Resin을 충전한 양쪽 소구치의 Buccal 부위에 광중합 실시

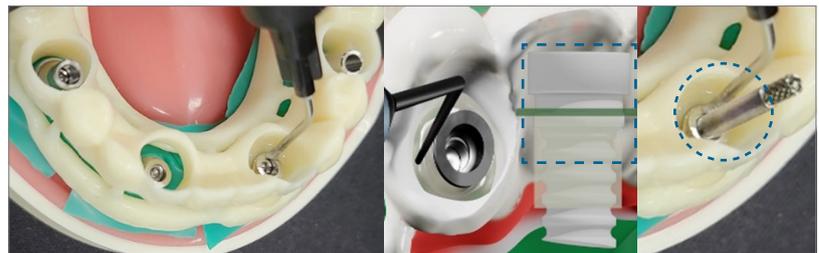

5 Bite Jig 제거 후 교합면에서 Resin을 추가적으로 주입하여 Provisional Bridge를 Cylinder에 고정

※ Cotton pallet로 Hole 밀봉 후 Resin 주입

※ Guide pin 삽입 후 Resin 주입 시 Resin이 Cylinder 내부로 유입되지 않도록 각별히 주의